


TTA toy system

matex



Yamauchi Matex

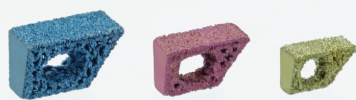

- 小型犬用TTAインプラント
- ワイヤー固定でスクリュー不要
- チタン製・国内生産



脛骨粗面部の骨切りを行った開大部に本ケージを設置し、脛骨前面より固定ピンを刺入し、固定ワイヤーを用いて固定することで、開大角度を維持し、膝関節の力学的な安定化を図ります。テンションバンドワイヤー法で強固な初期固定を実現します。

特
長

■ 小型犬に適した小サイズケージ固定

日本に多い小型犬に合わせた小サイズのケージです。10kg未満の小型犬が対象です。スクリューを使わずにワイヤーで固定するため、小型犬の繊細な骨への負担を軽減できます。

■ チタン製・国内生産

ケージ、ピン、ワイヤー全て生体適合性に優れたチタンを用いて国内生産しています。



■ 多孔質構造で骨成長促進

骨進入が期待できる多孔質構造を骨接触面に設けています。



サ
イ
ズ

ケージ



T

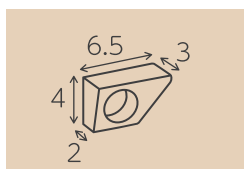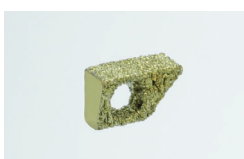


S

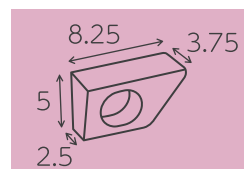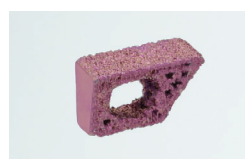

M

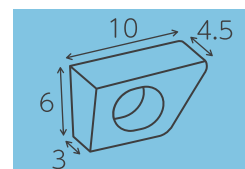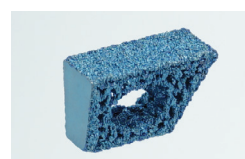


固定ピン

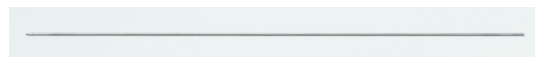

φ 1.0 × 150

固定ワイヤー

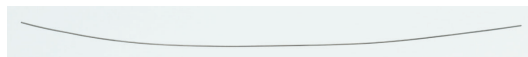

φ 0.6 × 200

単位:mm

使
用
方
法

1) 骨切り


カッピングガイドを用いて脛骨粗面部の骨切りを行う。

2) ケージの設置

骨切り部にボーンスプレッダーを差し込み、術前計画で決定したサイズのケージに適した角度まで開大し、設置する。

3) ケージの固定

固定ピンを脛骨粗面前方からケージ中央穴部を通し、脛骨後方皮質骨まで刺入する。骨切り部より尾側方向に貫通穴を作製し、テンションバンドワイヤー法にてケージを固定する。

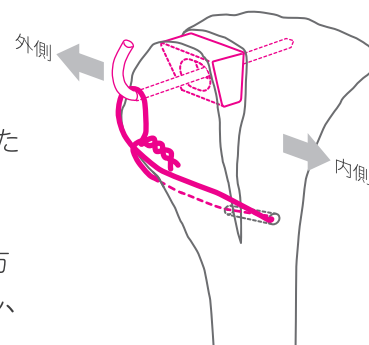

販売名：TTA toy システム

一般的名称：骨接合用品

承認番号：5動薬第2054号

原材料：チタン合金、チタン

販売名：TTA toy 手術用器械

一般的名称：その他の整形用機械器具

届出番号：7動薬第614号

原材料：ステンレス鋼

品番	品名	内容物
TS-CT1	TTA toy システム T	ケージ (T)、固定ピン、固定ワイヤー 各1個
TS-CS1	TTA toy システム S	ケージ (S)、固定ピン、固定ワイヤー 各1個
TS-CM1	TTA toy システム M	ケージ (M)、固定ピン、固定ワイヤー 各1個



TS-CG1 カッピングガイド



TS-BS1 ボーンスプレッダー

